

NEF-02 トラブル対処方法

音が弱くなった、出ない場合

ステップ①

軽度な汚れ(音が弱い)

1)



専用歯ブラシで耳栓、本体の汚れを清掃します。

2)




耳栓を外して音響ダンパーを清掃します。

ステップ②


重度な汚れ(音が出ない)

1)

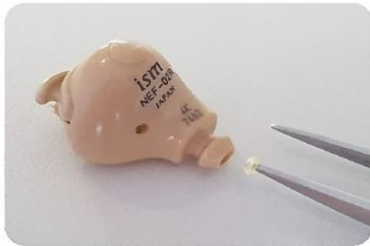

鋭利なピンセットで音響ダンパーの中心穴を刺し音響ダンパーを外して音が出るか確認します。
※音が出ない場合、内部が故障している可能性があるため弊社お客様相談窓口へ郵送ください。

2)

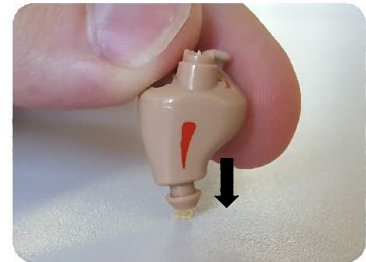

新しい音響ダンパーを平面に置き、補聴器を上から押しつけ装着します



LLサイズの耳栓もございます。




汚れの酷い耳栓は洗浄し、良く乾燥させ、装着します。

音響ダンパー1袋(10個入)

電池ボックスの破損

1)

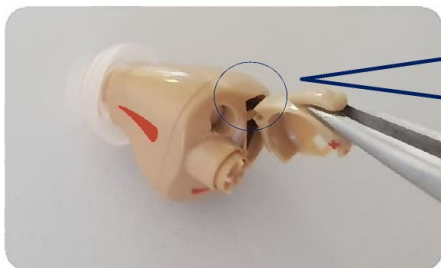

装着図



左用

右用

電池ボックスの爪を電池ボックス軸部に挟んでください。
挟むと「カチッ」と音が鳴ります。

電池ボックスが壊れた場合、
至急時は店舗在庫から使用してください。

【お問い合わせ】 株式会社ニコン・エシロール ヒアリングエイドセールス

フリーダイヤル 0120-312-507